

Уважаемый пациент,
пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, так как в ней содержится важная информация о правильном применении данного медицинского изделия. Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

Инструкция по применению

Спрей назальный

ГелоСитин®

Состав:

Спрей назальный ГелоСитин® содержит: очищенное кунжутное масло (60 %), дикаприлил карбонат, апельсиновое масло, лимонное масло и антиоксидантную смесь (натуральные экстракты с высоким содержанием токоферола, пальмитоиласкорбиновая кислота, аскорбиновая кислота, лимонная кислота, этанол, растительное масло).

Спрей назальный ГелоСитин® не содержит консервантов.

Объем содержимого упаковки:

15 мл

Показания к применению:

Спрей назальный ГелоСитин® применяется для физической обработки и увлажнения сухой слизистой оболочки носа, например, при воздействии сухого воздуха (кондиционер, отопление), при чрезмерном применении деконгестантов или при сухом рините с корками или без корок в области преддверия носа или на внутренней поверхности крыльев носа.

Противопоказания, взаимодействия и побочные эффекты:

Спрей назальный ГелоСитин® не следует использовать у пациентов с известной гиперчувствительностью к входящим в его состав ингредиентам.

Не использовать одновременно с другими местными средствами.

Если дополнительные медицинские изделия или другие средства, такие как назальные канюли для подачи кислорода, применяются назально одновременно со спреем назальным ГелоСитин®, их совместимость должна быть проверена.

В очень редких случаях чувство зуда или жжения может возникнуть в области носоглотки.

Что необходимо учитывать при применении у детей?

Не следует использовать у детей в возрасте младше трех лет.

Что необходимо учитывать при беременности и грудном вскармливании?

Спрей назальный ГелоСитин® может применяться без какого-либо риска в период беременности и грудного вскармливания.

Дозировка, способ и длительность применения:

Следующие инструкции применяются, если иное не рекомендовал Ваш врач.

Как Вы должны применять спрей назальный ГелоСитин®?

Пожалуйста, перед первым использованием закрутите прилагаемый насос-дозатор на стеклянном флаконе. Для этого удалите навинчивающуюся крышку флакона, вставьте тонкую трубку насоса-дозатора во флакон и плотно закрутите насос-дозатор (Рис. 1). Снимите зеленую защитную крышку и всегда держите флакон в вертикальном положении, поскольку в ином случае насос не сможет функционировать надлежащим образом. Важно: прокачайте распыляющий механизм несколько раз перед первым использованием и после длительных периодов неиспользования, избегая попадания в глаза, до тех пор, пока облако распыления не будет стабильно образовываться при быстрой и энергичной активации насоса (Рис. 2).

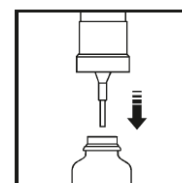


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

В каком количестве необходимо использовать спрей назальный ГелоСитин® и как часто?

Применяйте 1 – 2 распыления в каждую ноздрю несколько раз в день по мере необходимости (Рис. 3).

Как долго Вы можете использовать спрей назальный ГелоСитин®?

Спрей назальный ГелоСитин® считается безопасным для использования в течение длительного периода времени или для периодического использования.

По гигиеническим соображениям спрей назальный ГелоСитин® должен использоваться только одним человеком.

Инструкции и информация о сроке годности:

Не используйте спрей назальный ГелоСитин® после даты истечения срока годности. Рекомендуется использовать спрей назальный ГелоСитин® в течение 6 – 7 недель после вскрытия флакона.

Хранение и транспортировка:

Хранить спрей назальный ГелоСитин® при температуре не выше +25 °С. Не хранить спрей назальный ГелоСитин® в холодильнике.

Бережно храните медицинские изделия! Хранить в недоступном для детей месте! Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С.

Утилизация изделия:

После использования выбросить в мусорное ведро.

Ремонт / Гарантийное обслуживание / Техническое обслуживание:

Данное изделие не подлежит ремонту / гарантийному обслуживанию / техническому обслуживанию.

Производитель:

Г. Польш-Боскамп ГмбХ и Ко. КГ
Килер Штрассе 11, 25551 Хохенлокштедт, Германия

POHL BOSKAMP 

Организация, принимающая претензии потребителей:

АО «Красногорсклексредства»
143444, Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, 25
Тел.: +7 (495) 705-93-80
Факс: +7 (495) 705-93-82
www.krls.ru • krls@krls.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4550 от 24.11.2016

Последнее обновление информации:

Июль 2017 г.